

FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSMITTEL



HÄNDE-/HAUT-
DESINFEKTIONSMITTEL

Hospisept® - Tuch

Desinfektions- und Reinigungstücher für Flächen
und Inventar




Hospisept® - Tuch

Desinfektion gesunder, unverletzter Haut und kleiner, alkoholbeständiger Flächen

Wirksam gegen Bakterien (inkl. Tbc), Pilze, behüllte Viren und Rotaviren.

- breites Wirkungsspektrum
- reinigt
- einzeln abreißbar
- sofort einsetzbar
- gut hautverträglich

Einsetzbar überall dort, wo nicht gesprüht werden kann und schnelle Abtrocknung wichtig ist.

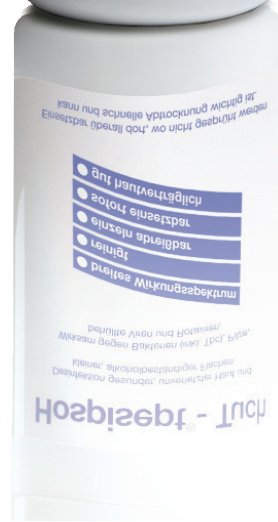

Hospisept® - Tuch



CE 0482

Gebrauchsinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Hospisept®- Tuch

ZUSAMMENSETZUNG

1 Feuchttuch enthält durchschnittlich:
1,1 g Propan-1-ol, 0,32 g Ethanol 96 %, Butan-2-on,
Dibutyladipat, Gereinigtes Wasser.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Desinfektion und Reinigung von Kleinflächen aller Art in Krankenhäusern, Sanatorien, Heimen, Arztpraxen, im Rettungsdienst usw.
- Einsetzbar überall dort, wo nicht gesprüht werden kann und schnelle Abtrocknung wichtig ist.
- Hygienische Händedesinfektion

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

- Fläche abreiben und das Präparat bis zur Abtrocknung (ca. 5 Min.) einwirken lassen.
- Hygienische Händedesinfektion: 30 Sek. Hände vollständig benetzt lassen (ggfs. 2 Tücher nehmen).
- begrenzt viruzid* inkl. HBV/HCV/HIV und
Rotavirus: 30 Sek.
Adenovirus: 1 Min.
Polyomavirus (SV 40): 5 Min.

*gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Entzündlich! (Flammpunkt nach DIN 51755: 26 °C). Max. 2 m² behandeln.
- Desinfektionsmittel nicht über 25 °C, fern von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Tuch nicht in die Augen bringen.
- Alkoholempfindliche Kunststoffe, wie z.B. Acrylglas nicht behandeln.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133,
12247 Berlin, Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99-269

EIGENSCHAFTEN

- Überall einsetzbar, wo nicht gesprüht werden kann und schnelle Abtrocknung wichtig ist.
- Breites Wirkungsspektrum: Gegen Bakterien (inkl. Tbc), Pilze, behüllte Viren und Rotaviren.
- Einzeln abreißbar.
- Sofort einsetzbar.
- Gut hautverträglich.
- Im Gegensatz zu sonstigen Flächenreinigungs- und Desinfektionstüchern, bei denen gemäß BGR 250/TRBA 250 bei der Desinfektion Handschuhe zu tragen sind, kann das Hospisept®-Tuch mit ungeschützten Händen verwendet werden.
- Für jeden Notfallkoffer (Krankenwagen, Rettungshubschrauber) geeignet.

BESONDERE HINWEISE

Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

6 Dosen à 100 Tücher	Art.-Nr. 3585
6 Nachfüllbeutel à 100 Tücher	Art.-Nr. 3575
15 Hospisept-Tücher einzeln eingeschweißt im Umkarton	Art.-Nr. 3595

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

D: 030 - 77 99 2-0



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14